

プレフィルドシリンジの取扱い

生食注シリンジ「オツカ」5mL, 10mL, 20mL (20mLのルアースリップタイプを除く)

チェック ✓ ルアースリップ の印刷表示

開封前



この状態は
未開封ね



シリンジキャップを
まわして開封 します



ミシン目で
シュリンク包装が破れます

開封後



この状態だと
開封済みね

あっ!? 印刷表示がずれるから
開いてることが
わかりやすいわ!

✓ チェック

誤って残液を再使用されないように
開封したあとは、キャップの廃棄
をお奨めします。

